

## HVORDAN TA PÅ LINEREN

Lineren skal brukes med gel-siden inn, så den får kontakt med huden, og tekstil-siden skal vende ut.

Start med å vrenge lineren ved å rulle den slik at gel-siden vender utover. Rull så lineren på benet og sørg for at stumpen er helt nede i bunnen av lineren.

Sørg for god kontakt mellom lineren og huden, og pass på at det ikke oppstår rynker eller luftlommer.

# alfimed

Olav Brunborgs vei 6  
1396 Billingstad  
Tlf 31 29 68 86  
[info@alfimed.no](mailto:info@alfimed.no)  
[www.alfimed.no](http://www.alfimed.no)

Takk for at du valgte en liner fra Alfimed

CE



CEpartner4U BV  
Esdoornlaan 13, 3951 DB Maarn  
The Netherlands  
[www.CEpartner4U.com](http://www.CEpartner4U.com)



Thermo-Ply, Inc.  
11811 31st Court N  
St. Petersburg, Florida, 33716  
USA  
[www.thermoplygel.com](http://www.thermoplygel.com)

# ENCORE

## PRODUKTINFORMASJON



## LINERS

# alfimed

## RENGJØRING

Rengjør lineren ved behov.

Ta av lineren og vreng den slik at gel-siden vender ut. Vask så lineren med en mild såpe. Bruk en myk klut eller hendene. Unngå å skrubbe og bruk ikke grov svamp eller børste. Skyll grundig med lunkent vann og tørk med et håndkle. Rull så lineren så tekstil-siden vender ut og la den tørke.

Det kan være greit å ha to linere å bytte på og det er jo alltid trygt å ha en i reserve.

## DESINFISERING

Desinfiser lineren jevnlig.

Vreng lineren slik at gel-siden vender ut. Bruk en myk, ren klut med en liten mengde etylalkohol eller isopropylalkohol og tørk forsiktig av lineren.

Skyll grundig med lunket vann og tørk med et håndkle. Rull så lineren så tekstil-siden vender ut og la den tørke.

Ikke la alkoholen sitte for lenge på lineren og bløtlegg aldri lineren i alkohol.

## OPPBEVARING

Oppbevar lineren tørt og kjølig.

Ved lagring over en lenger periode, legg lineren i en ren plastpose.

Oppbevar alltid lineren med tekstil-siden ut.

## GARANTI

Alle Encore linere leveres med 60 dagers garanti mot fabrikkfeil. Denne garantitiden gjelder fra den dagen brukeren får lineren tilpasset på ortopedisk verksted.